

Dr. Martin Schwarz EXPERT 38%

zestaw do samodzielnego wybielania zębów w domu pod nadzorem stomatologa



www.DrMartinSchwarz.com/E38/

ZESTAW Dr. Martin Schwarz EXPERT 38% zawiera:

Strzykawka 5ml

INGREDIENTS : AQUA, GLYCERIN, UREA PEROXIDE, CARBOMER, POTASSIUM NITRATE

Stężenie H2O2 5,69%

Przed zabiegiem:

- Przechowywać w temperaturze 2–8°C, w lodówce, suchym ciemnym miejscu - niedostępnym dla dzieci.
- Konieczne dokładne oczyszczenie i wysuszenie zębów.
- Zaleca się usunąć płytkę nazębną, stomatologicznie lub preparatem Dr. Martin Schwarz BioScaling.
- Wyleczyć zmiany próchnicowe i uszkodzenia przyzębia.
- W celu zapewnienia właściwego efektu i komfortu zabiegu, upewnić się co do właściwego i szczelnego osadzenia koronek, mostków i wypełnień.

Jak wykonać zabieg krok po kroku:

1. Przeznaczone do wybielania zęby należy dokładnie wyszczotkować i oczyścić.
2. Niewielką ilość preparatu Dr. Martin Schwarz Expert 38% należy umieścić w nakładkach* od strony powierzchni wargowych zębów, które chcemy wybielić (zaleca się umieszczanie w szynie preparatu w ilości odpowiadającej kuleczce o średnicy 3-4 mm na każdy ząb). Ilość żelu w nakładkach powinna być na tyle duża by pokryć powierzchnie zębów przeznaczonych do wybielania i na tyle mała by po nałożeniu nakładek na zęby, żel nie wyostał się z nich na błonę śluzową.
3. Nakładki z preparatem Dr. Martin Schwarz Expert 38% należy umieścić w jamie ustnej we właściwej pozycji, jeżeli na błonie śluzowej pojawiają się niewielkie ilości preparatu Dr. Martin Schwarz Expert 38%, usunąć go za pomocą suchej szczoteczki do zębów, chusteczki higienicznej bądź palcem.
4. Utrzymać preparat Dr. Martin Schwarz Expert 38% na wybielanych powierzchniach przez 20-30 min. W przypadku uczucia silnego pieczenia błony śluzowej podczas procesu wybielania, należy niezwłocznie usunąć żel z miejsca pieczenia chusteczką higieniczną.
5. W czasie noszenia nakładki z preparatem wybielającym nie należy pić, palić papierosów, czy też spożywać żadnych posiłków.
6. Należy wystrzegać się potykania żelu oraz płynu po jego płukaniu.
7. Po upływie zalecanego czasu, zęby i nakładki należy oczyścić z resztek preparatu i wypłukać starannie jamę ustną.
8. Nakładki oczyścić strumieniem bieżącej wody, przy pomocy szczoteczki z pastą do zębów.
9. Zastosowanie naświetlania specjalistycznymi lampami nie wpływa znacząco na wynik wybielania.
10. Najlepszy efekt uzyskuje się powtarzając kilku- kilkunastokrotnie proces wybielania (tylko jeden raz dziennie!) co 1-3 dni. Przejściowo może wystąpić krótkotrwały efekt nadwrażliwości zębów. Nie należy wybielać zębów wykazujących ubytki i uszkodzenia. Wybielanie nie wpływa na zmianę koloru koronek i wypełnień. Nie należy pić, palić ani jeść podczas wybielania zębów oraz co najmniej 2 godz. po zabiegu.
11. W czasie do 24 godz. po wykonaniu wybielania unikać spożywania intensywnie zabarwionych produktów (np. buraki, marchew, czerwona kapusta) i napojów (herbata, kawa, czerwone wino, sok z czarnej porzeczki) etc.
12. Fotografowanie zębów przed wybielaniem, a następnie po każdym procesie wybielania i porównanie ich barwy w skali Vita pozwoli na obiektywną ocenę skuteczności wybielania.

* Aby uzyskać optymalny efekt wybielania - użyć nakładek stomatologicznych, które pozwalają uzyskać precyzyjny odcisk zębów pacjenta, ewentualnie innych nakładek o podobnej funkcjonalności (np. Dr. Martin Schwarz FlexiTrays).

PRZECIWIWSKAZANIA do stosowania produktu:

- wiek pacjenta poniżej 18 roku życia
- ciąża i karmienie piersią
- przyjmowanie silnych leków (psychotropowe, przeciwpadaczkowe, cytostatyki) oraz substancji zawierających barwne jony metali (np. żelaza, miedzi, kobaltu) będącymi składnikami leków i suplementów diety
- alergia lub nadwrażliwość na utleniające, glicerynę i żywice poliakrylowe
- uszkodzenia mechaniczne lub próchnicowe zębów
- odsonięte powierzchnie korzeniowe zębów
- duża ilość wypełnień, koron, mostów lub licówek w zębach przednich
- nadwrażliwość zębów
- zła higiena jamy ustnej we współistniejącym stanie zapalnym dziąseł
- zaburzenia w stawach skroniowo-żuchwowych
- palenie tytoniu

PRZECHOWYWANIE

Po każdorazowym użyciu należy dokładnie umyć nakładki. Wszystkie elementy zestawu należy przechowywać czyste i suche. Nie używać w przypadku uszkodzenia którejkolwiek z części zestawu. Zestaw używać zgodnie z instrukcją i w celu do którego jest przeznaczony. Przechowywać w temperaturze 2–8°C, w lodówce, miejscu niedostępnym dla dzieci. Preparat może być przechowywany poza lodówką do 7 dni.

INTERAKCJE

Równoczesne stosowanie leków wymaga wcześniejszej konsultacji z lekarzem prowadzącym terapię.

Istnieje możliwość niepożądanych interakcji preparatu Dr. Martin Schwarz EXPERT 38% z substancjami zawierającymi barwne jony metali (np. żelaza, miedzi, kobaltu) będącymi składnikami leków i suplementów diety. Zapobiegawczo należy powstrzymać się przed konsumpcją takich produktów na 72 godz. przed i 72 godz. po zakończeniu stosowania systemu Dr. Martin Schwarz EXPERT 38%.

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów mogących mieć związek ze stosowaniem preparatu Dr. Martin Schwarz EXPERT 38% należy przerwać zabieg wybielania i skonsultować się z lekarzem stomatologiem.

Dane osoby odpowiedzialnej:

LDK GmbH

Im Technologiepark 1

Frankfurt Oder, 15236

Info@DrMartinSchwarz.com

DR. MARTIN SCHWARZ