

Dr. Martin Schwarz Teeth Desensitiser TD

Teeth Desensitiser TD

Dentální gel proti přecitlivělosti zubů.



www.DrMartinSchwarz.com/TD/

Obsahuje fluorid sodný.

Teeth Desensitiser TD

Gel Dr. Martin Schwarz – Teeth Desensitiser TD byl vytvořen pro osoby potýkající se s problémem přecitlivělosti zubů. Teeth Desensitiser TD účinně zklidňuje citlivost zubů způsobenou tepelnými faktory (horké/studené nápoje a jídlo), změnami pH způsobenými např. kyselým ovocem a také podrážděním zubů způsobeným bělicími přípravky.

- chrání přecitlivělé zuby a pečuje o ně,
- zklidňuje nepříjemné pocity při konzumaci studených/horkých nebo kyselých pokrmů,
- osvěžuje dech,
- zanechává v ústech osvěžující chuť,
- snadno se používá.

Před zákrokem:

- Uchovávejte na suchém a tmavém místě mimo dosah dětí.
- Je nutné provést léčbu zubního kazu a parodontálního poškození
- Důkladně si očistěte zuby.

Použití:

Před použitím si důkladně vyčistěte zuby. Malé množství gelu naneste na zubní kartáček (můžete přidat také zubní pastu, ale není to nutné) a čistěte zuby po dobu minimálně 90 sekund. Proces opakujte každý den až do získání požadovaného výsledku.

Nepoužívejte, pokud:

- je pacient mladší 16 let (pokud lékař nerozhodne jinak)
- jste těhotná nebo kojíte
- používáte silné léky (psychofarmaka, antiepileptika, cytostatika)
- se potýkáte s alergií nebo přecitlivělostí na oxidanty, glycerin a polyakrylové pryskyřice
- se potýkáte s mechanickým nebo kazivým poškozením zubů
- se potýkáte s obnaženými zubními krčky
- se potýkáte s poruchami temporomandibulárního kloubu.

Skladování:

Uchovávejte na čistém, suchém místě mimo přímé sluneční záření, mimo dosah dětí. Přípravek nepoužívejte, pokud je obal poškozený. Používejte dle návodu k použití.

Interakce:

Současné užívání léků vyžaduje předchozí konzultaci s lékařem vedoucím ošetření. V případě znepokojujících příznaků, které mohou souviset s užíváním přípravku Dr. Martin Schwarz – Teeth Desensitiser TD přerušete zákrok a poraďte se se svým zubařem.

Údaje o odpovědné osobě:
LDK GmbH
Im Technologiepark 1
Frankfurt Oder, 15236

Info@DrMartinSchwarz.com

DR. MARTIN SCHWARZ

Dr. Martin Schwarz Teeth Desensitiser TD

Teeth Desensitiser TD

Zubný gél na citlivé zuby.



www.DrMartinSchwarz.com/TD/

Obsahuje fluorid sodný.

Teeth Desensitiser TD

Dr. Martin Schwarz - Teeth Desensitiser TD gel bol vytvorený pre ľudí, ktorí bojujú s problémom citlivosti zubov. Teeth Desensitiser TD účinne zmiernuje citlivosť zubov spôsobenú tepelnými faktormi (horúce/studené nápoje a potraviny), zmeny pH spôsobené napr. kyslým ovocím, ako aj podráždenie zubov spôsobené bieliacimi prípravkami.

- chráni a ošetruje citlivé zuby,
- zmierňuje nepríjemné pocity pri konzumácii studených, horúcich alebo kyslých jedál,
- osviežuje dych,
- zanecháva v ústach osviežujúcu chuť,
- ľahko sa aplikuje

Pred zákrokom:

- Uchovávajúte na suchom a tmavom mieste mimo dosahu detí.
- Kazy a poškodenia ďasien sa musia vyliečiť.
- Dôkladne si vyčistíte zuby.

Používanie:

Pred použitím si dôkladne vyčistíte zuby. Na zubnú kefku naneste malé množstvo gélu (môžete pridať zubnú pastu, ale nie je to nevyhnutné) a čistíte zuby aspoň 90 sekúnd.

Postup každý deň opakujte, kým nedosiahnete požadovaný účinok.

Nevhodné:

- pre pacientov vo veku do 16 rokov (pokiaľ lekár neodporučí inak)
- počas tehotenstva a dojčenia
- pri užívaní silných liekov (psychotropných, antiepileptických, cytostatických)
- pri alergií alebo precitlivenosti na oxidanty, glycerín a polyakrylové živice
- pri mechanickom poškodení zubov alebo kazoch
- pri odhalených korienkoch
- pri poruchách dolnej čeluste

Skladovanie:

Skladujte na čistom, suchom a tmavom mieste, mimo dosahu detí. Nepoužívajte, ak je obal poškodený. Používajte v súlade s návodom.

Interakcie:

Pri súbežnom užívaní liekov kontaktujte vášho ošetrojúceho lekára. V prípade znepokojujúcich príznakov, ktoré môžu súvisieť s používaním prípravku Dr. Martin Schwarz- Teeth Desensitise TD by sa zákrok mal prerušiť a konzultovať so zubným lekárom.

Zodpovedná osoba:
LDK GmbH
Im Technologiepark 1
Frankfurt Oder, 15236

Info@DrMartinSchwarz.com

DR. MARTIN SCHWARZ